


Assemblaggio Face Shield

Componenti

1. Telaio per face shield scaricabile dal link (...)



2. Scudo protettivo in policarbonato compatto trasparente di dimensioni 50cm x 24cm. Le dimensioni del taglio e il distanziamento tra i fori sono riportati nell'immagine che segue

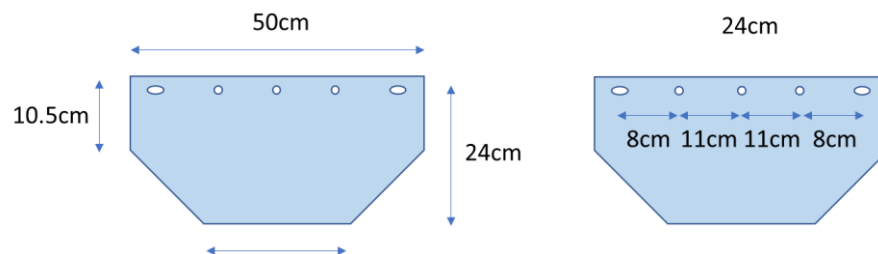

3. Fascia elastica con fori per la regolazione di dimensioni 25cm x 5cm



4. Striscia ammortizzata in EtileneVinileAcetato adesiva di dimensioni 15cm x 1cm



5. Bacchetta per rilegatura di fogli A4



Assemblaggio

1. Una volta stampato il telaio si applica uno smalto epossidico, tramite spray o pennello, che ricopra l'intero oggetto (lo smalto può essere anche poliuretano o acrilico)
2. Si incolla la striscia di EVA nella parte di telaio che andrà a contatto con la fronte



3. Si divide la bacchetta per rilegatura in due parti lunghe circa 10.5cm e si inseriscono nei due lati corti del foglio di policarbonato



4. Si inserisce la fascia elastica



5. Si aggancia il foglio di policarbonato facendo corrispondere i fori con i supporti del telaio. Il bloccaggio del foglio deve essere garantito dai due supporti più esterni



Di seguito una foto del prodotto assemblato

